



Liebe Kundin, Lieber Kunde,

Hilfe zur Selbsthilfe – Bei RUCK finden Sie viele nützliche Tipps zu einer Vielzahl an Produkten. Nutzen Sie die Suchfunktion unter [www.hellmut-ruck.de](http://www.hellmut-ruck.de), geben dort die Artikelnummer Ihres Produktes ein und Sie finden z.B. neben der Gebrauchsanweisung und Sicherheitsdatenblatt auch nützliche Hilfestellungen zur Anwendung oder zur Selbsthilfe bei Servicefällen.

Mit diesem Dokument geben wir Ihnen nützliche Tipps, wie Sie die Gasdruckfeder der Fußauflage Ihrer PODOLOG MOON master oder professional einstellen können. Gerne stehen wir aber auch mit dem RUCK Service-Team persönlich für Sie zur Verfügung. Telefon: +49 (0)7082. 9442 255, e-Mail: [service@hellmut-ruck.de](mailto:service@hellmut-ruck.de)

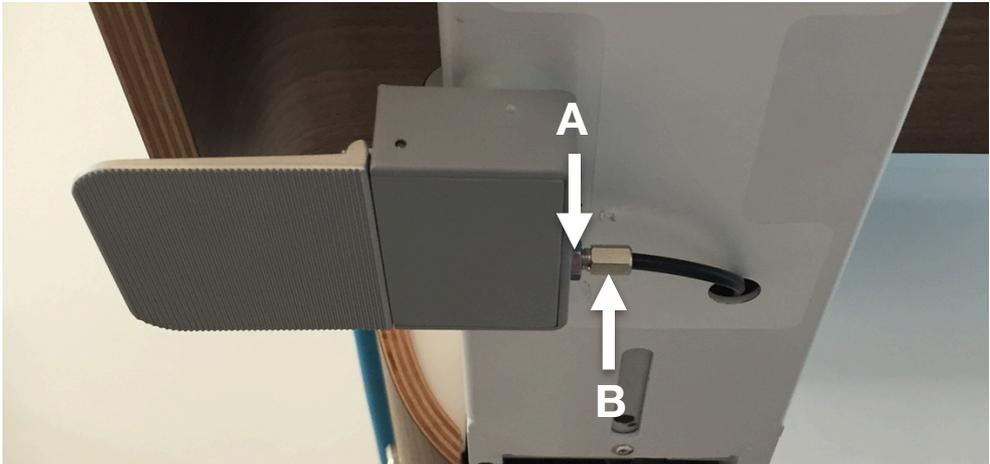
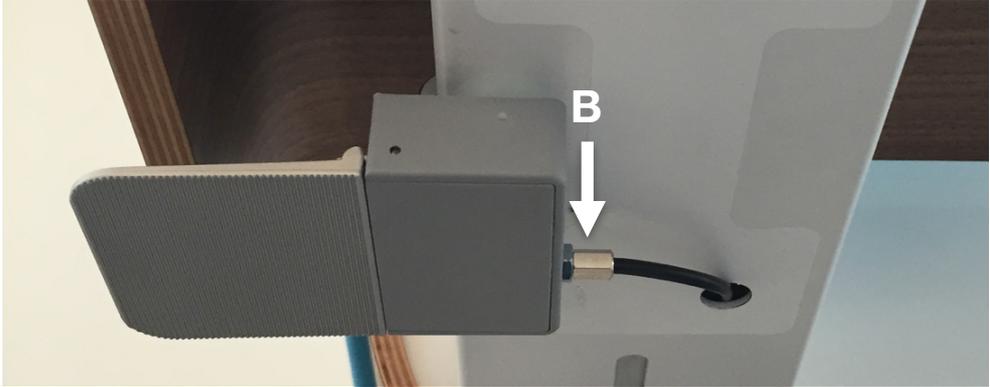
### **BENÖTIGTE WERKZEUGE/HILFMITTEL/MESSMITTEL**

- Flachzangen oder 5er und 8er Gabelschlüssel

### **FEHLERBESCHREIBUNG/LÖSUNGSANSATZ**

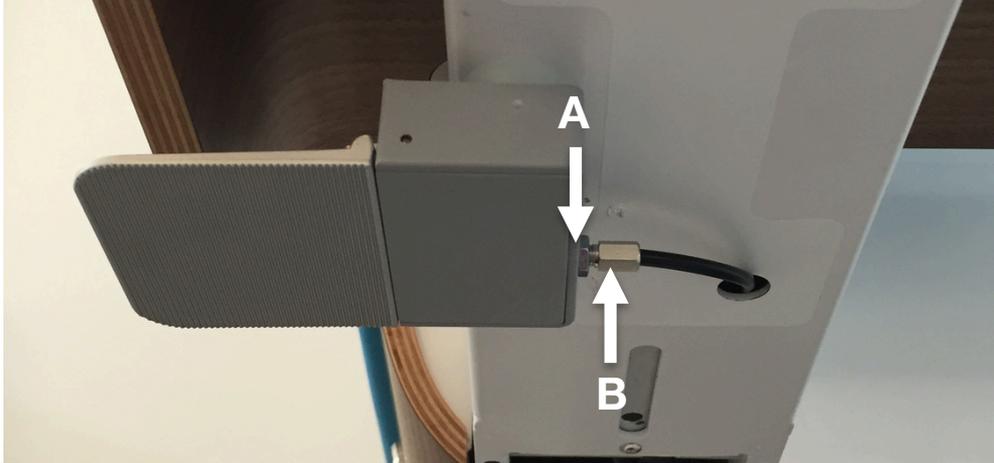
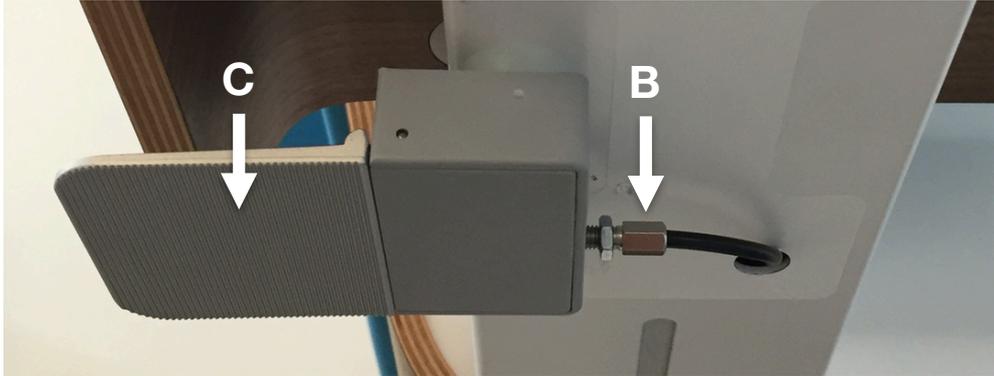
**Nr. 10 – 20**      Fussteil senkt sich unter Last ab oder bewegt sich „allein“ nach oben

**Nr. 30 – 50**      Fussteil lässt sich nur schwer bewegen

Nr.	Arbeitsschrittbeschreibung
10	<p>Der Seilzug der Gasdruckauslösung ist zu straff eingestellt und muss softer eingestellt werden. Dazu lösen Sie die Kontermutter [A] und drehen diese in Richtung der Mutter [B].</p> 
20	<p>Die Mutter [B] maximal eindrehen bis der Seilzug der Gasdruckauslösung die Gasdruckfeder nicht mehr auslöst.</p> 



## P05\_16\_KUNDENSERVICE-PODOLOG-MOON GASDRUCKFEDER-EINSTELLEN

Nr.	Arbeitsschrittbeschreibung
30	<p>Der Seilzug der Gasdruckauslösung ist zu schwach eingestellt und muss gestrafft werden. Dazu lösen Sie die Kontermutter [A] und drehen diese in Richtung der Mutter [B].</p> 
40	<p>Die Mutter [B] soweit herausgedreht bis der Seilzug durch Betätigung des Flachstasters [C] Gasdruckauslösung die Gasdruckfeder wieder auslöst.</p> 
50	<p>Schließlich Kontermutter [A] sichern, indem dies in Richtung dem Flachstastergehäuse gedreht wird.</p> 