



RUCK[®]
FÜR FUSS UND PFLEGE

Fauteuil de traitement **MOON**


CALES DE TRANSPORT



AVERTISSEMENT !!!

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL DE DÉMONTAGE DES CALES DE TRANSPORT **AVANT LA MISE EN SERVICE** ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES ÉTAPES QUI Y SONT DÉCRITES !!!

LE NON-RESPECT RISQUE D'ENTRAÎNER L'ENDOMAGEMENT DE VOTRE FAUTEUIL DE TRAITEMENT AINSI QU'UNE EXCLUSION DE LA GARANTIE ET DE LA RESPONSABILITÉ !

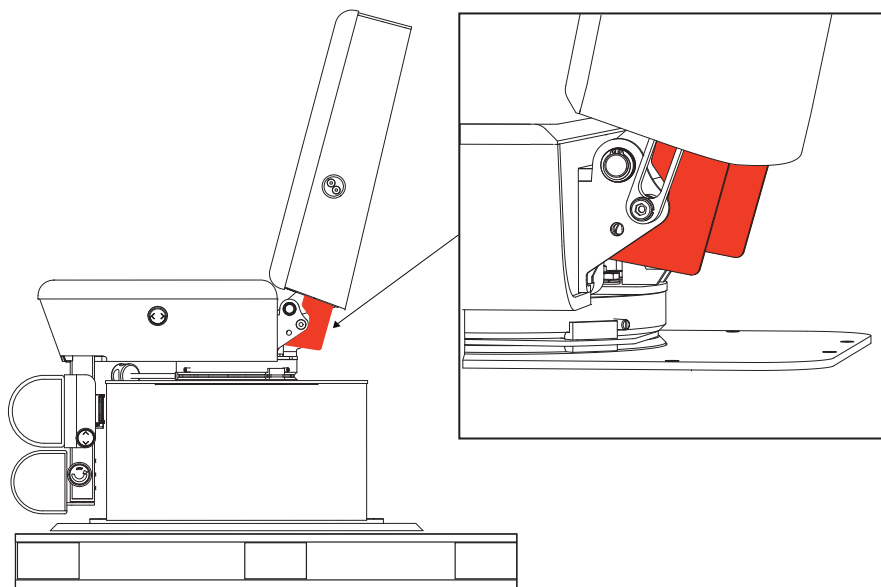

DÉCLARATION RELATIVE AU PRÉSENT MODE D'EMPLOI

La société Hellmut Ruck GmbH se réserve tous les droits d'apporter des modifications et des compléments au présent mode d'emploi. La société Hellmut Ruck GmbH a pris grand soin d'éviter toute lacune ou omission dans le présent manuel. Si vous remarquez des erreurs ou des lacunes, veuillez nous en faire part. Cependant, la société Hellmut Ruck GmbH décline toute responsabilité pour les erreurs dans le présent mode d'emploi et les dommages consécutifs lorsqu'ils sont dus à la mise à disposition de ce manuel ou à l'usage de ce dernier durant l'utilisation du produit.

Il est interdit de transmettre ou compléter le présent mode d'emploi sans autorisation expresse de la société Hellmut Ruck GmbH.

SYMBOLES UTILISÉS



Ce symbole indique un danger pour les personnes ou le produit. Les consignes correspondantes doivent impérativement être respectées.



Ce symbole renvoie à des remarques utiles. Des informations supplémentaires relatives au produit et à son utilisation sont indiquées ici.



HELLMUT RUCK GmbH | Daimlerstraße 23 | D-75305 Neuenbürg, Germany
web www.hellmut-ruck.de | Téléphone +49 (0)7082 - 944 20 | Téléfax +49 (0)7082 - 944 22 22

Copyright

© 2020 Hellmut Ruck GmbH. Tous droits réservés. Il est interdit de copier, modifier, reproduire ou traduire le présent document sans autorisation écrite préalable de la société Hellmut Ruck GmbH.




AVERTISSEMENT !

Ne déplacer le fauteuil de traitement que par les deux fixations d'accoudoirs montées sur le côté du dossier avec les cales de transport intégrées. Les deux cales de transport rouges doivent être montées sur le fauteuil de traitement pendant le transport et l'installation ainsi qu'au moment de la pose des patins de mise à niveau.


Conservez les cales de transport en vue d'un futur déménagement. Bloquez alors de nouveau le fauteuil même si vous souhaitez modifier sa position sur son lieu d'installation. En cas de déménagement, n'hésitez pas à nous demander conseil pour le transport de votre fauteuil de traitement.

Le non-respect risque d'endommager votre fauteuil de traitement


LE NON-RESPECT RISQUE D'ENTRAÎNER UNE EXCLUSION DE LA GARANTIE ET DE LA RESPONSABILITÉ !

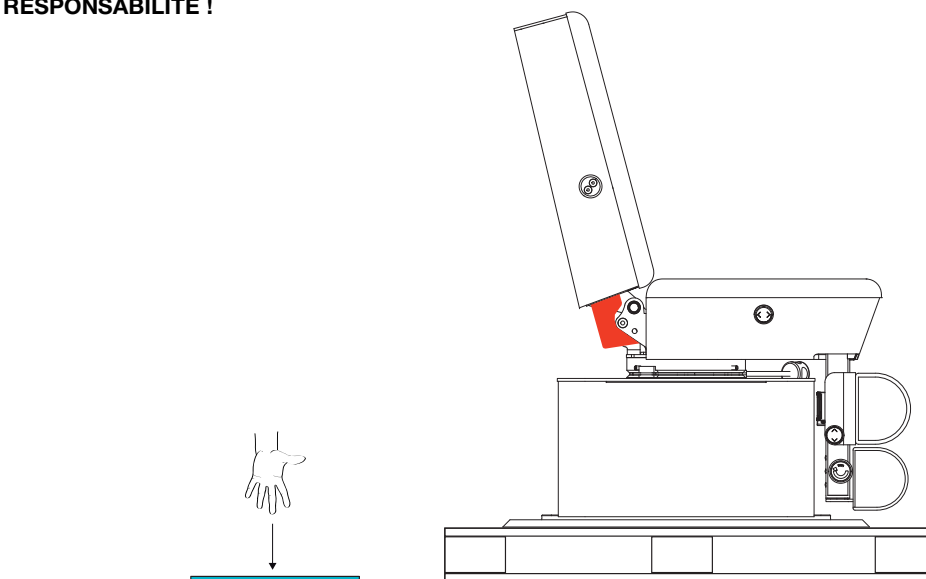


1. Avant de décharger le fauteuil de traitement, protégez le socle en posant un support protecteur (p. ex. un tapis de sol) devant la palette.

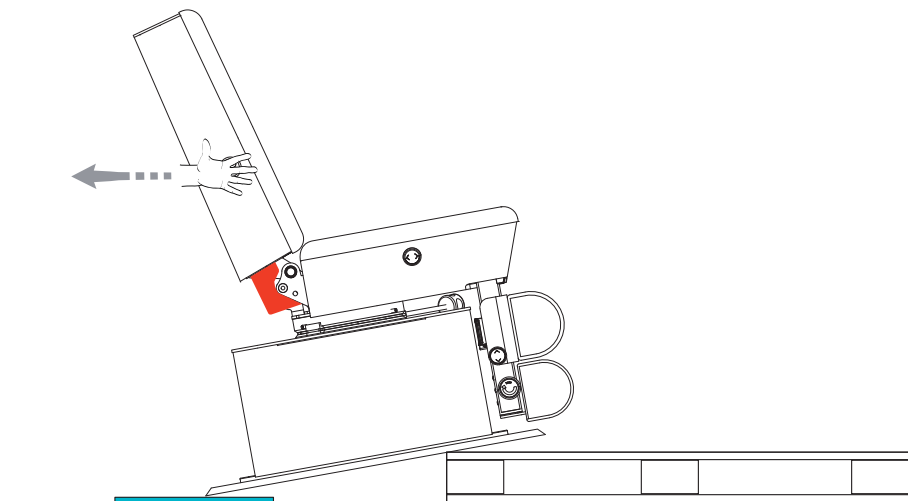


2. Comme sur l'illustration, saisissez les deux fixations des accoudoirs à droite / à gauche du dossier. Tirez le fauteuil de traitement dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le socle repose sur le support protecteur.

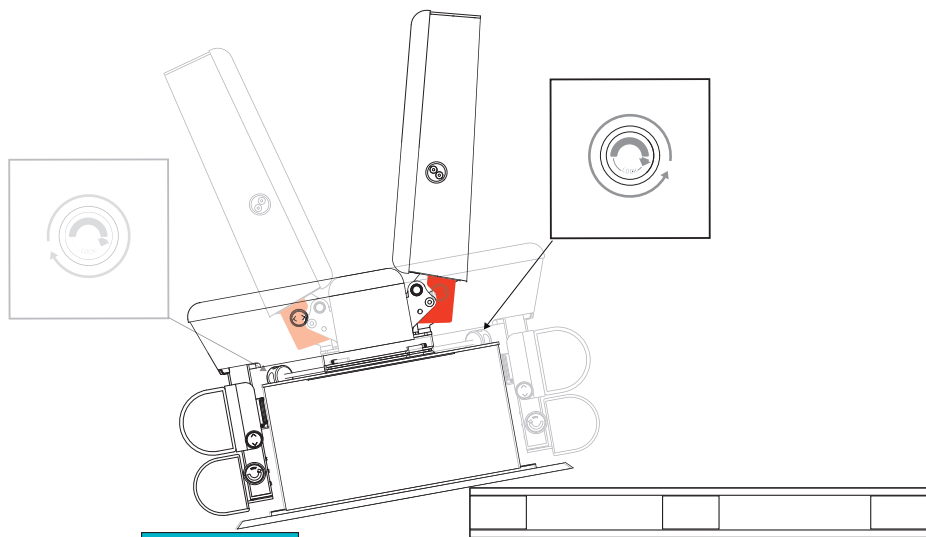


3. Pour que pendant cette opération les repose-pieds ne touchent pas la palette, faites pivoter le fauteuil de traitement à 180°. Pour ce faire, ouvrez le volant de rotation.

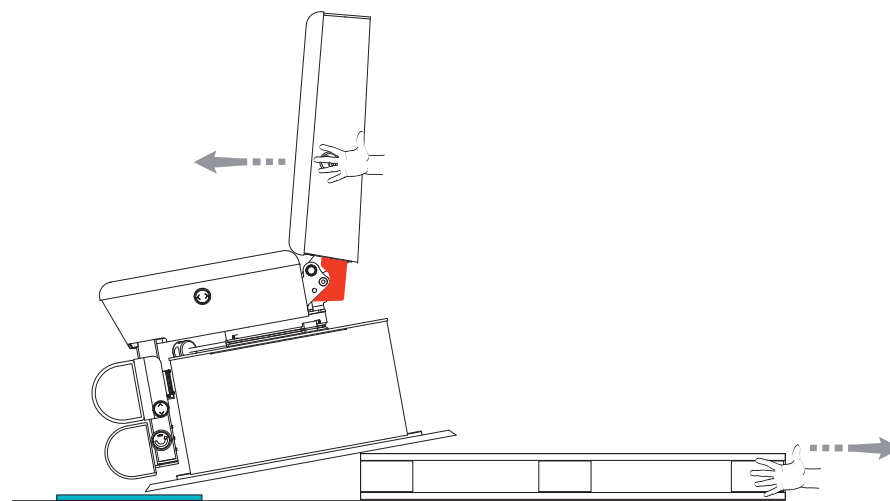


4. Comme sur l'illustration, saisissez les deux fixations des accoudoirs à droite / à gauche du dossier. Soulevez le fauteuil de traitement et demandez à une seconde personne de retirer la palette sous le fauteuil.

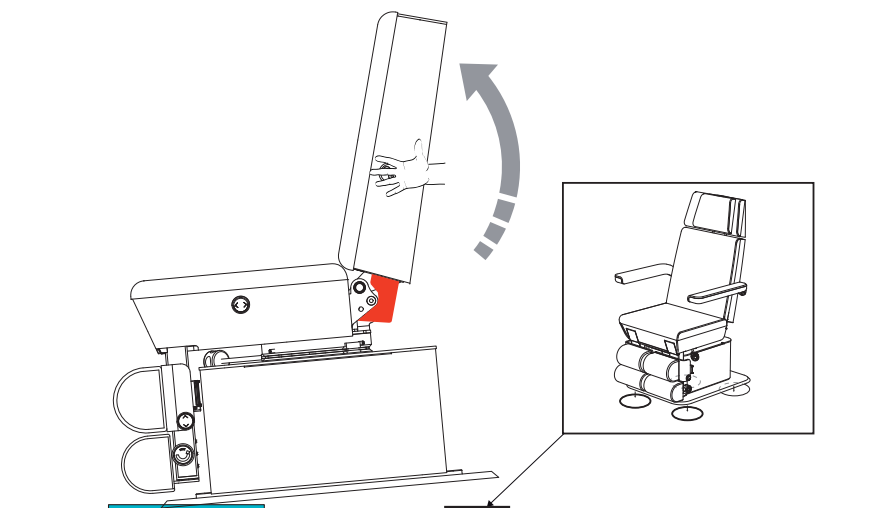


5. Comme sur l'illustration, saisissez les deux fixations des accoudoirs à droite / à gauche du dossier. Soulevez le fauteuil de traitement et demandez à une seconde personne de poser deux patins de mise à niveau sous le socle.

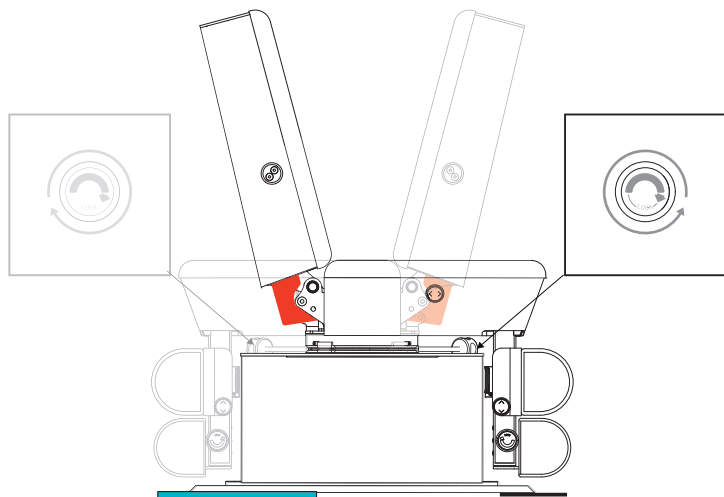


6. Faites pivoter le fauteuil de traitement à 180°.

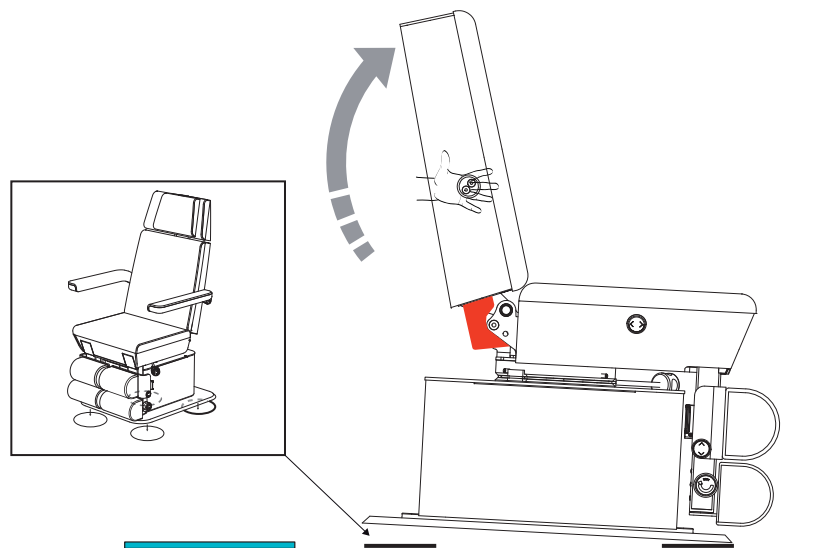


7 Comme sur l'illustration, saisissez les deux fixations des accoudoirs à droite / à gauche du dossier. Soulevez le fauteuil de traitement et demandez à une seconde personne de poser deux patins de mise à niveau sous le socle.

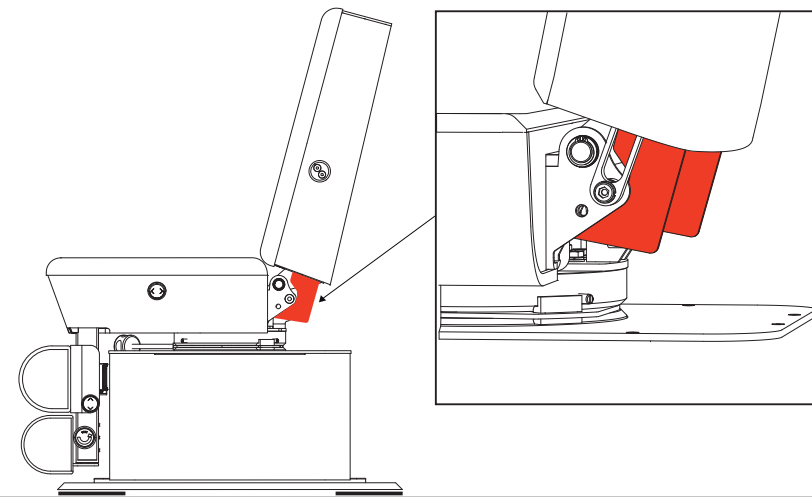

8. Avant la mise en service du fauteuil de traitement, démonter les deux cales de transport rouges. Dans le cas contraire, le dossier ne peut pas être incliné, ce qui risque d'endommager l'entraînement et / ou le siège et le dossier.

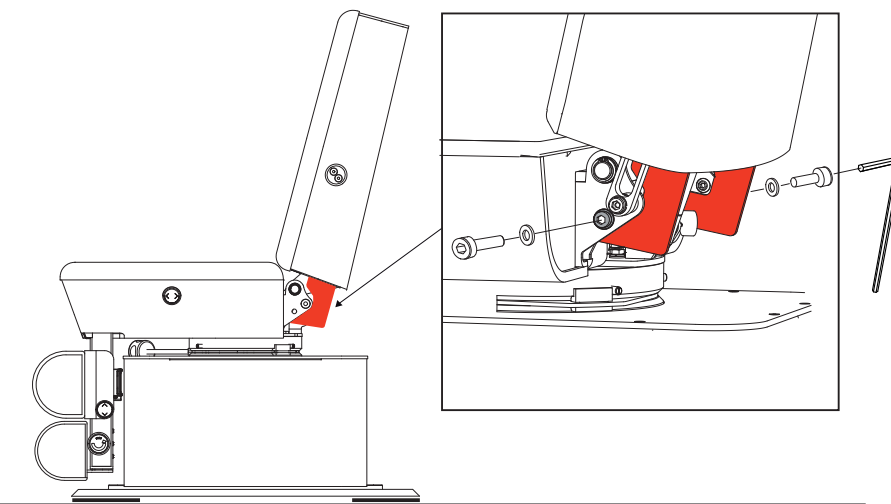

9. Avant de commencer à démonter les cales de transport, protégez l'habillage en bois du mécanisme de course en hauteur et le socle du fauteuil de traitement. Avec une clé appropriée, desserrez la vis à six pans creux, respectivement à droite/à gauche et retirez-les avec les rondelles correspondantes.

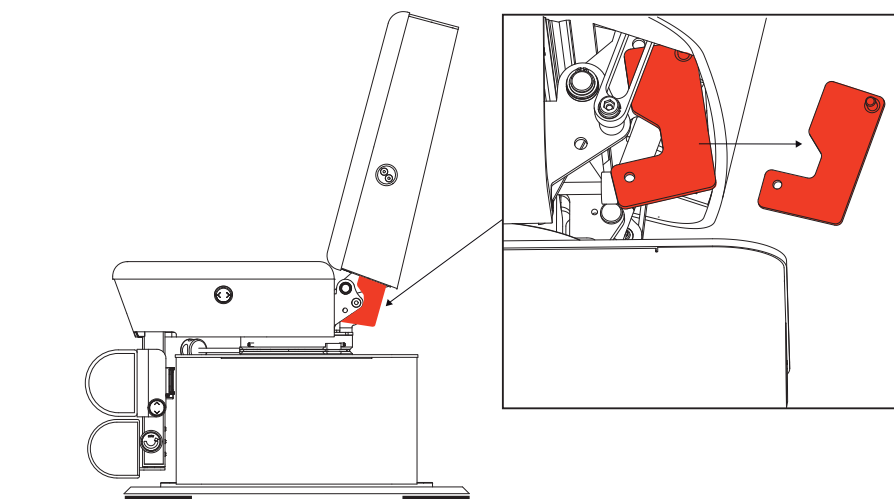

10. On peut maintenant faire pivoter et déposer les cales de transport très facilement.



Conservez les cales de transport en vue d'un futur déménagement. Bloquez alors de nouveau le fauteuil même si vous souhaitez modifier sa position sur son lieu d'installation - pour ce faire, suivez les instructions des points 8 à 10 en sens inverse.

RUCK[®]
FÜR FUSS UND PFLEGE

HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23
D-75305 Neuenbürg
tél. +49 (0)7082. 944 20
fax +49 (0)7082. 944 22 22

e-Mail kontakt@hellmut-ruck.de
web www.hellmut-ruck.de