



Art.-Nr. 2972001 und Art.-Nr. 2972002

## RUCK® HÄNDEDESINFEKTIONSSTATION SENSOR, 1.000 ML

Hinweise zur Anwendung | Instandsetzung

- Die Anzeigeleuchte befindet sich im Innern des Gehäusedeckels am Spender und ist durch das Fenster sichtbar, beim Anschalten leuchtet sie grün.
- Wenn Sie den Spender bewegen, schalten Sie das Gerät vorher aus oder vermeiden Sie, das Gerät in der Nähe des Sensorbereichs zu fassen, um eine versehentliche Abgabe von Flüssigkeit zu vermeiden.

### Das Gerät reagiert nicht

Mögliche Ursache	Korrektur
Der Sensorbereich ist durch Flüssigkeitsreste verschmutzt	Schalten Sie das Gerät aus und wischen Sie den Sensor mit einem sauberen feuchten Tuch ab
Die Batterien sind nicht richtig eingesetzt	installieren Sie die Batterien ordnungsgemäß. Siehe "Auswechseln der Batterien"
Die Batterien sind leer	Ersetzen Sie die Batterien. Siehe "Auswechseln der Batterien"
Die Batterien sind nicht installiert	Setzen Sie die Batterien ein. Siehe "Auswechseln der Batterien"
der Wählschalter steht auf AUS	Stellen Sie den Wählschalter auf EIN
die Hand des Benutzers ist zu weit oder zu nahe vom Sensor entfernt	Platzieren Sie Ihre Hand ca. 8-12 cm unterhalb des Sensors und halten Ihre Hand flach auf
Grelles Licht in der Nähe des Spenders stört den Sensor	Bewegen Sie den Spender an einen anderen Ort, um starke Reflexionen zu vermeiden



## Das Gerät wird ausgelöst aber spendet keine Flüssigkeit

Mögliche Ursache	Korrektur
Der Spender muss regelmäßig benutzt werden	Wenn mit einem leeren Tank begonnen wird oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, muss der Spender möglicherweise bis zu achtmal ausgelöst werden, bevor Flüssigkeit durch das System fließt. Lösen Sie den Sensor so lange aus bis Flüssigkeit abgegeben wird
Die Flüssigkeit enthält Mikroperlen, Peelings, Salze oder andere körnige Elemente, die für den Spender nicht geeignet sind	Spülen Sie die Perlen oder das Granulat aus der Einheit. Siehe "Reinigung der Einheit"
Die Düse ist verstopft	Reinigen Sie die Düse. Siehe "Reinigung der Düse"
Die Düse ist nicht richtig platziert	Platzieren Sie die Düsenpumpe korrekt in der dafür vorgesehenen Führungsschiene
Die Düse tropft	Die Düse muss erneuert werden
Die Flüssigkeit ist mit dem Spender nicht kompatibel.	Verwenden Sie je nach Pumpentyp des Spenders Flüssigkeit oder Gel, der Gelyp ist mit einer Tropfendüse ausgestattet, der Flüssigkeitstyp mit einer Sprühdüse.

## Der Spender gibt zu viel oder zu wenig Flüssigkeit ab

- Hinweis: Das Abgabevolumen des Spenders kann mit verschiedenen Flüssigkeiten variieren.

## Nach auffüllen des Tanks funktioniert die Düse nicht mehr

Mögliche Ursache	Korrektur
Der Hahn oder die Düse sind nicht richtig positioniert	Der Hahn oder die Düse muss nach auffüllen des Tanks wieder in die dafür vorgesehene Position gebracht werden. Positionieren Sie den Hahn und die Düse mittig zwischen den Plastikschienen.

## Die Anzeigeleuchte blinkt rot

Mögliche Ursache	Korrektur
Das Anzeigeleuchte blinkt rot wenn die Batterie leer ist	Tauschen Sie die Batterien, wenn die Leistung nachlässt. Siehe "Auswechseln der Batterien"
Die Anzeigeleuchte blinkt rot und gibt keine Flüssigkeit ab, wenn der Sensor von Lichtern oder Reflexionen gestört wird	Vermeiden Sie helles Licht oder sonstige Reflexionen die auf den Sensor einwirken.

## Der Spender spendet von alleine

Mögliche Ursache	Korrektur
Licht oder Reflexionen in der Nähe des Spenders löst den Sensor aus	Stellen Sie den Spender an einen anderen Ort und vermeiden Sie stark reflektierende Oberflächen und direktes Sonnenlicht.



## **Batterie Wechsel**

- Schalten Sie das Gerät aus
- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefaches innerhalb des Gerätes rechts
- Installieren Sie vier Baby C Batterien in der angegebenen Richtung
- Befestigen Sie die Abdeckung wieder
- Schalten Sie das Gerät ein

## **Reinigung oder Austausch der Düse**

Achtung: Wenn die Düse beschädigt wird oder verloren geht tauschen Sie sie aus.

- Schalten Sie das Gerät aus
- Entfernen Sie die Düse aus dem Tank, indem Sie sie nach dem Entleeren kräftig aus dem Tank ziehen.
- Stecken Sie die neue Düsenereinheit in das Tankloch
- Bringen Sie die Düse und den Tank in der richtigen Position an den Spender an
- Stellen Sie sicher das sich die Düse in der korrekten Position befindet
- Schalten Sie das Gerät ein

## **Reinigung des Spenders**

- Schalten Sie das Gerät aus
- Öffnen Sie das Gehäuse und nehmen Sie den Tank mit der Düsenpumpe vorsichtig heraus
- Spülen Sie den Tank mit Wasser aus und entleeren Sie ihn.
- Entfernen und reinigen Sie die Düse. Siehe "Reinigung oder Austausch der Düse"
- Schalten Sie das Gerät ein
- Lösen Sie den Sensor wiederholt aus um verbleibende Seifenrückstände zu entfernen

## **Hilfreiche Hinweise**

Pflege der Metallabdeckung, Stahlgehäuse und des Ständers

- Reinigen Sie den Spender mit alkoholfreien Flächendesinfektionstüchern (RUCK Art. 2967002, 2967102, 2967202). Überschüssige Flüssigkeit sofort entfernen, da sie Rost verursachen kann.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln mit Chloriden (Bleichmittel). Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit Chloriden (Bleichmittel) kann zu einem Farbverlust führen.