


# Wechsel der Ersatz-Farbrolle – step by step - Anleitung


RUCK® Auszeichnungsgerät für Sterilisationsgut, 26443 Ersatz-Farbrolle, 26440 Auszeichnungsgerät



1  
Auszeichnungsgerät und Ersatz-Farbrolle  
bereit legen

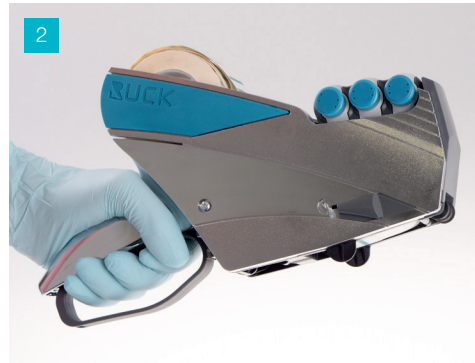

2  
Bediengriff drücken und gedrückt halten

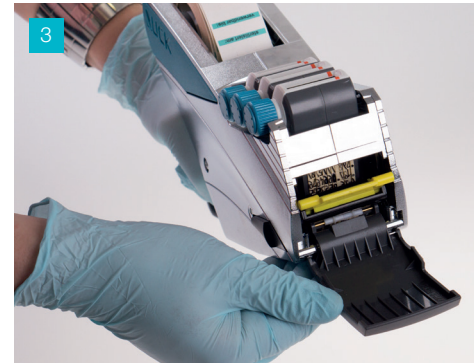

3  
Kunststoffdeckel öffnen




4  
Gebrauchte Farbrolle entnehmen




5  
Neue Farbrolle, Aufschrift TOP muss oben  
sein



6  
Auf Führung beim Einlegen achten

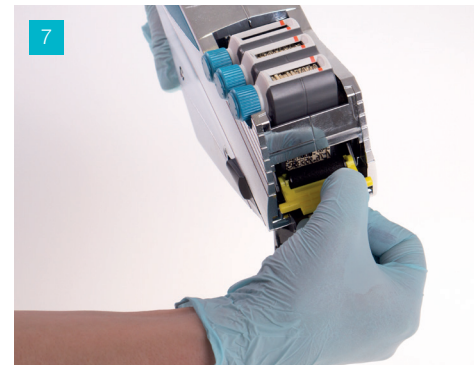

7  
Neue Farbrolle einlegen

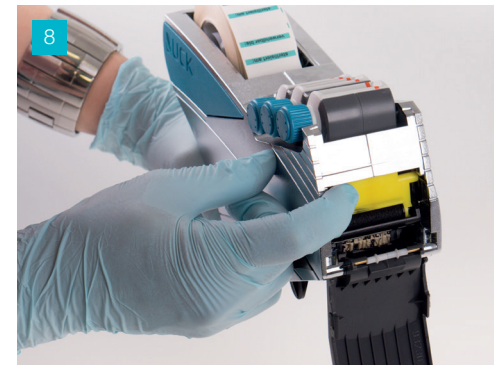


8  
Farbrolle in die Führung gleiten lassen

# Wechsel der Ersatz-Farbrolle – step by step - Anleitung

RUCK® Auszeichnungsgerät für Sterilisationsgut, 26443 Ersatz-Farbrolle, 26440 Auszeichnungsgerät




Farbrolle rutscht in die Halterung

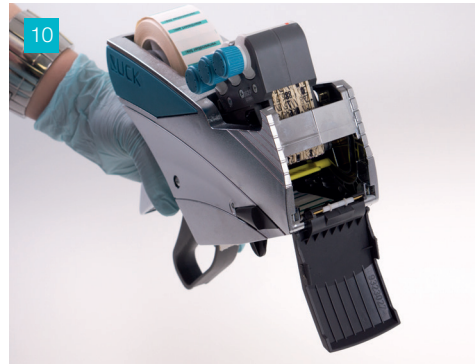

Bediengriff jetzt loslassen damit die Farbrolle fest einrastet



Kunststoffdeckel schließen

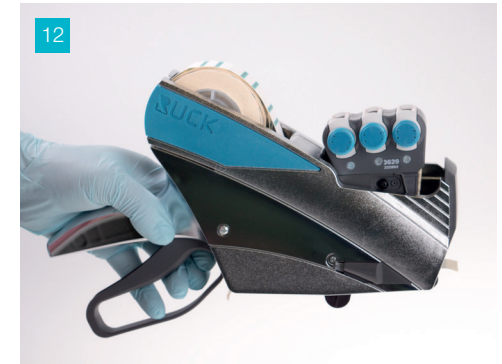

Auszeichnungsgerät ist wieder einsatzbereit

## Videotipp



[www.hellmut-ruck.de](http://www.hellmut-ruck.de)