



# PedoPrint<sup>®</sup> TRITTSPURGERÄT

Art.-Nr. 33100



## ANWENDUNGSBEREICH

- Darstellung der fußsohlenseitigen Belastungsfläche und des Fußumrisses
- erlaubt Rückschlüsse auf Fußdeformitäten
- Arbeitsgrundlage für Einlagen- und Schuhversorgung

## MERKMALE

- traditionelles, mobiles Trittspurgerät zur Herstellung von 2D-Fußabdrücken
- erhältlich als Komplettsset inkl. Gummimatte (gerastert oder glatt), Umrissstift, Farbroller, Stempelfarbe (blau), 50 Stk. Trittspurblätter, 10 Stk. Schutzfolien
- bei Verwendung für mehrere Patienten verbessern die Schutzfolien-Zuschnitte die Hygiene
- auch Einzelkomponenten bestellbar (siehe Tabelle)

## INFORMATIONEN

### Einsatz

- Stempelfarbe mittels Farbroller gleichmäßig dünn und einseitig auf Gummimatte verteilen
- Trittspurpapier einlegen, Rahmen mit gefärbter Seite der Gummimatte auf Papier klappen
- Fuß auf saubere Seite der Gummimatte positionieren, mit Umrissstift den Fuß in 90° umzeichnen
- Rahmen hochklappen, Papier mit Fußabdruck entnehmen
- vor neuem Abdruck muss erneut Tinte auf Gummimatte verteilt werden

### Reinigung/Wartung

- regelmäßige Reinigung des Trittspurgerätes inkl. Gummimatte mit Flächen-desinfektionsmittel wird empfohlen

