

## Verpackungsanleitung des PODOLOGNOVA<sup>3</sup>

Wenn Sie uns ihren PODOLOG Nova 3 zur Wartung, Reparatur, oder ihr Leihgerät zurückschicken, achten Sie bitte darauf, dass der Filterbeutel entfernt und das Gerät gereinigt und desinfiziert ist, gemäß Gebrauchsanweisung Art.-Nr. 8011011. Außerdem nur nach dieser Verpackungsanleitung vorgehen. Vielen Dank!

2



Die Styropor-Seitenteile links und rechts befestigen.

4



Nur mit leichten  
Druck hineindrücken.

1



Podolog Nova 3 reinigen, desinfizieren  
und Filterbeutel entfernen.

3



Vom Handstück die  
Schutzhülle entfernen  
und in das kleinere  
Styropor-Loch stecken.

5



In den Karton verpacken.

## Verpackungsanleitung des **PODOLOGECO** und **PODOLOGONE**

Wenn Sie uns ihren PODOLOG ECO/ONE zur Wartung, Reparatur, oder ihr Leihgerät zurückschicken, achten Sie bitte darauf, dass der Filterbeutel entfernt und das Gerät gereinigt und desinfiziert ist, gemäß Gebrauchsanweisung Art.-Nr. 8013301. Außerdem nur nach dieser Verpackungsanleitung vorgehen. Vielen Dank!

2



Die Styropor-Seitenteile links und rechts befestigen.

4



Nur mit leichten Druck hineindrücken.

1



PODOLOG ECO/ONE reinigen, desinfizieren und Filterbeutel entfernen.

3



Das Handstück in das größere Styropor-Loch stecken.

5



In den Karton verpacken.